

トビー 視線ビューワ：インストール注意事項

◆「トビー視線ビューワ」をインストールするパソコンのユーザーアカウントについて

「トビー視線ビューワ」を使用するパソコンのユーザーアカウントが日本語(もしくは全角英数字)で作成されている場合、視線追跡データをビデオ(動画)で保存することが出来ません。

※計測及び静止画の保存は可能です。

「トビー視線ビューワ」はユーザーアカウントが半角英数字で作成されたパソコンでご使用ください。

ソフトをインストールする前に、パソコンのユーザーアカウントをご確認下さい。

「C:\Users (もしくはユーザー)」に日本語(全角英数字含む)のフォルダがある場合はユーザーアカウントが日本語で作成されている可能性がありますので、ご注意ください。

【対応策】

- 1)新規にパソコンをセットアップする場合は、ユーザー登録時に半角英数字でユーザーアカウントを作成してください。(全角英数字も使用しないで下さい)
- 2)既に日本語でユーザーアカウントを作成したパソコンでご使用する場合は、パソコンを初期化して再セットアップするか、新しいアカウント(管理者)を作成しユーザーアカウントを上記 1)を参考に登録してください。作成した新しいユーザーアカウントでログインしてご使用下さい。

◆【トビー視線ビューワ システム要件】

- Operating System:
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows 8.1
 - Windows 10
- a multicore processor (dualcore or more) with at least 1.5 GHz
- 2 GB RAM memory
- Graphics 60 MB VRAM
- Pixel shader 2.0 or higher
- 100 MB free disk space for the installation of the Tobii Dynavox Gaze Viewer software

総輸入販売元: 株式会社 クレアクト Tobii アシスティブ事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階

TEL: 03-3442-5401 FAX: 03-3442-5402 メール: info@creact.co.jp Web: www.creact.co.jp